


## SERUM

### Účel a princip prostředku

nxDROP | SERUM je odběrová sada sloužící pro odběr, zabalení a transport srážlivé kapilární krve do laboratoře k jejímu dalšímu zpracování.

Uživatel odebere kapilární krev pomocí samostatných komponent společně použitelných za výše uvedeným účelem. Odběrová sada není samostatným vyšetřením a její úlohou je sběr biologického materiálu ve vhodné podobě pro další zpracování.

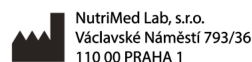

### Dříve než použijete nxDROP | SERUM


- Odběrová sada je určena pro použití osobami staršími 18 let, nebo pod dohledem dospělé osoby pro děti starší 8 let.
- Všechny komponenty sady jsou výhradně pro jednorázové použití.
- Samoodběrovou sadu uchovávejte důsledně mimo dosah dětí.
- Pokud si nejste jisti provedením odběru, anebo ve Vás provedení testu vyvolává pocity vysokého diskomfortu, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
- Použití testu konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, pokud jste těhotná nebo kojíte.
- Použití testu konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, pokud trpíte poruchou srážlivosti krve.
- Nepoužívejte lancetu, pokud ochranný uzávěr lancety nechrání její ostří.
- Použitou, nepoužitou nebo jinak nevyhovující lancetu vložte do obálky a zašlete spolu se vzorkem do laboratoře nebo zlikvidujte jako nebezpečný odpad, kód 18 01 01 dle platné legislativy a předpisů.
- Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu EU (www.sukl.cz).

- Jakékoli jiné použití sady pro jiný účel, než je uvedeno, není v souladu s určením výrobku a výrobce nemůže zaručit kvalitu informačního výstupu z následného zpracování.


Pro jakékoli dotazy k použití odběrové sady:  
[info@nutrimedlab.cz](mailto:info@nutrimedlab.cz)  
 +420 775 963 227

### Postup pro použití odběrové sady nxDROP | SERUM


Před provedením odběru vyjměte a zkontrolujte všechny komponenty které odběrová sada obsahuje:

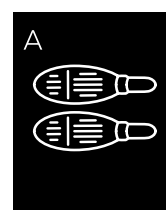


**2x kontaktem aktivovaná lanceta - mechanické zařízení pro provedení vpichu**

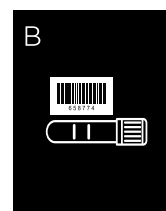


**1x odběrová mikrozkušavka s červeným víčkem, určená k odběru kapilární krve, opatřená unikátním čárovým kódem.**

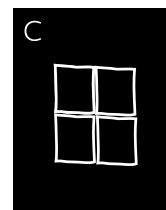


**4x absorbční polštářek ze střížené buničiny**

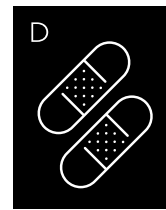

**2x náplast s polštářkem**

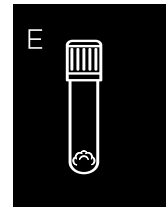

**1x přepravní zkumavka průhledná, uzavíratelná bílým víčkem**

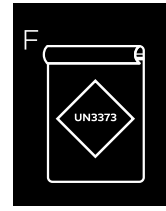

**1x zpáteční obálka označená kosočtvercovým znakem a popisem UN3373**

### Použití odběrové sady krok za krokem

Samotný odběr se obvykle provádí v ranních hodinách, před prvním jídlem, avšak při dostatečné hydrataci. Vždy se však řiďte doporučeními pro konkrétní vyšetření konkrétní laboratoře, která Váš vzorek bude zpracovávat.



1. Před provedením odběru buďte řádně hydratovaní, například během hodiny vypijte dvě sklenice vody.




2. Připravte si čisté a klidné místo, kde nehrozí znečištění odběrové mikrozkušavky a které Vám zajistí vhodné hygienické podmínky pro provedení odběru.



3. Pečlivě si umyjte ruce mýdlem. Pro pohodlný odběr doporučujeme ponořit ruce alespoň na 30 vteřin do příjemně teplé vody, aby se prohřály. Nakonec si ruce osušte.



4. Zvolte prst pro vpich, ze kterého provedete odběr.

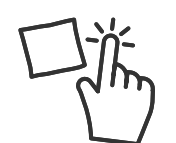

5. Před vpichem očistěte pokožku zvoleného prstu a nechte oschnout.




6. **Odemčení lancety:** otočením ochranného uzávěru otevřete lancetu.




7. Prst položte bříškem vzhůru na pevný podklad, podle přiloženého obrázku přiložte lancetu k místu, kde provedete vpich z přední strany bříška prstu.



8. **Aktivace lancety:** pevně přitlačte lancetu směrem k prstu. Ta automaticky provede jemný a téměř bezbolestný rychlý vpich mechanismem, který se poté opět bezpečně vrátí do těla lancety a tím zamezí případnému nechtěnému poranění.

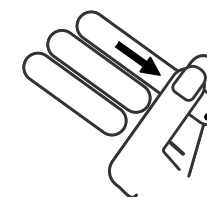


9. Pro snadné provedení odběru je ideální se postavit, svésit ruku přibližně do úrovně pasu a tu si jemně promasírujte směrem od dlaně k prstu.

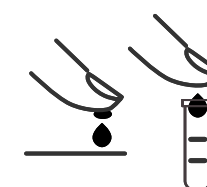


10. První kapku krve po vpichu jemně otřete. Počkejte, až se v místě vpichu vytvoří dostatečná kapka, která samovolně odkápně do otevřené **mikrozkušavky**. Pokud kapka neodkápně sama, dotkněte se okrajem kapky vnitřní hrany mikrozkušavky, avšak zabraňte jejímu styku s bříškem prstu.




11. Objem potřebné krve určuje laboratoř poskytující laboratorní vyšetření, minimální objem je po spodní rýsku 250 µl.

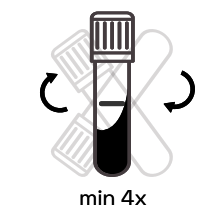

12. Odběrovou **mikrozkušavku** pečlivě uzavřete a jemně promíchejte - čtyřikrát otočte dnem vzhůru a zpět.

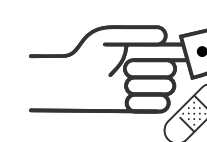


13. Po provedeném odběru si prst otřete přiloženým absorpčním **polštářkem** a ranku přelepte náplastí.

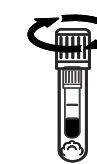

14. Odběrovou mikrozkušavku s Vaším krevním vzorkem vložte do **přepravní zkumavky** se šroubovacím uzávěrem, který pečlivě uzavřete.



15. Přepravní zkumavku vložte do **zpáteční obálky** a obálku zalepte.

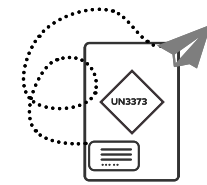






16. Zalepenou obálku se vzorkem odešlete podle pokynů laboratoře, která bude Váš vzorek zpracovávat.


eNávod



## Vysvětlivky použitých symbolů

- IVD** Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
- REF** Katalogové číslo
- LOT** Kód šarže
- SN** Sériové číslo
- UDI** Jedinečný identifikátor prostředku
-  Výrobce
-  Čtěte návod k použití
-  Použit do data
-  Nepoužívejte, jestliže je balení poškozeno a čtěte návod k použití
-  Chránit před slunečním zářením
-  Nepoužívat opětovně
-  Omezení teploty
-  Chránit před vlhkem

## Kontaktem aktivované lancety BD Microtainer® POSTUP POUŽITÍ

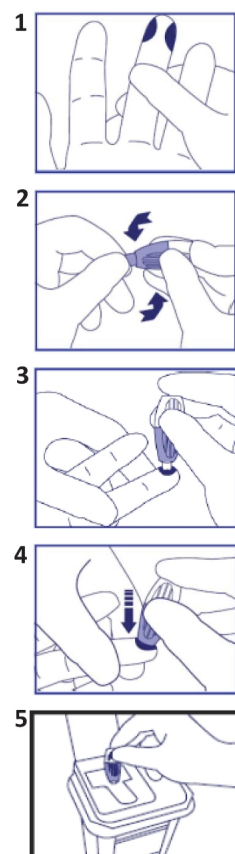

## Komponenty odběrové sady

**Kontaktem aktivovaná lanceta** BD Microtainer®  
Výrobce: BD, Becton Dickinson

**CE** **REF** 366594  
0050

**Odběrová mikrozkušavka** BD Microtainer®  
s červeným víčkem, určená k odběru srážlivé kapilární krve, opatřená unikátním čárovým kódem.

Výrobce: BD, Becton Dickinson

**CE** **IVD** **REF** 365964

**Absorbční polštářek** ze střížené buničiny

Výrobce: Steriwund, s.r.o.

**CE** **REF** 1375

**Náplast s polštářkem**

Výrobce: Steriwund, s.r.o.

**CE** **REF** 1215b

**Přepravní zkumavka** průhledná uzavíratel ná  
zkumavka s bílým víčkem

Výrobce: SARSTEDT AG & Co. KG

**CE** **IVD** **REF** 60.732

**Vatová výplň** přepravní zkumavky

Výrobce: Steriwund, s.r.o.

**CE** **REF** 1170

## Datum vydání návodu

5. 9. 2023